

TIRAS DE CONTROL DEL ÍNDICE DE ÁCIDO PERACÉTICO

Para solución activada de ANIOXYDE 1000

INDICACIÓN

Control del índice de ácido peracético reactivo dentro de una disolución de desinfección total en frío ANIOXYDE 1000.

MODO DE EMPLEO

- Utilizar la tira de control para validar des baño :
Al comenzar la sesión o al reanudar la actividad después de una interrupción.
Cada 4 horas de actividad consecutiva (más allá de 10 endoscopios al día).
En case de actividad importante o de condiciones particulares (elevación de la temperatura...), puede ser necesario aumentar la frecuencia de uso de las tiras de control.
- Mojar totalmente la parte reactiva de la tira en la disolución que se ha de probar durante un segundo.
- Eliminar el exceso de disolución agitando ligeramente la tira.
- Leer el resultado 10 segundos después del remojo. No interpretar un resultado obtenido por una lectura realizada más de 15 segundos después del remojo.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

- Las tiritas permanecen estables si:
- 24 meses se conservan entre +2°C y +8°C.
 - 90 días después de apertura.

Conservar el frasco cerrado para garantizar la duración de las tiras.

Fecha de apertura:


INFO

La coloración amarilla del baño de Anioxyde 1000 indica que la mezcla Activador/Generador acaba de efectuarse PERO no indica la presencia o la ausencia de ácido peracético en la solución.


Sólo se ha de tener en cuenta el cambio del color de la tirita.

Baño con coloración (amarillo) o no + cambio (negro) de la tirita.

Color Azul intenso a negro,

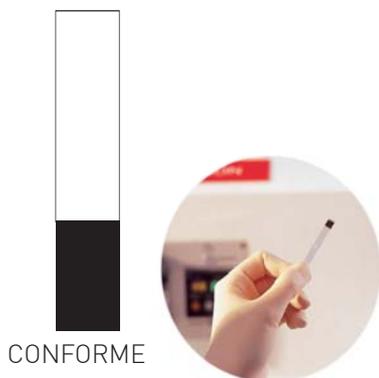

- Sin color
- Desaparición rápida del color,
- Puntitos,
- Borde coloreado

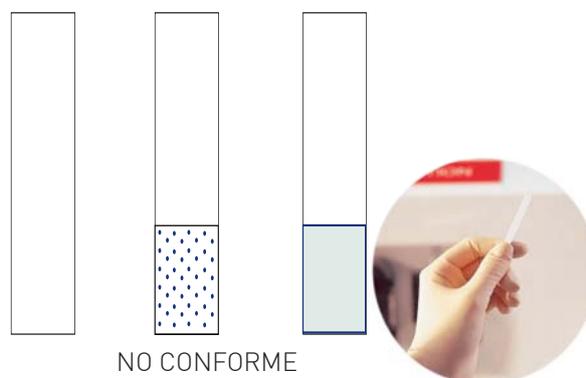

E1100194-111128- Laboratoires ANIOS